

# Tunstall




## Lifeline Digital kodning

### Opret forbindelse til DMP for at hente indstillinger:

- Tænd for Lifeline Digital nødkaldet og vent til det er startet helt op (alle dioder lyser fast – uden blink).
- Tryk på den gule **ekstraknap** (1) og hold den nede i ca. 3 sekunder.
- Slip knappen, når enheden udsender et stigende lydssignal. Den gule LED-indikator begynder at blinke efter noget tid.

### Talebeskeder:

- Enheden opretter nu forbindelse til DMP og annoncerer:
- "Forbundet til DMP", når forbindelsen er oprettet.
- Når processen er færdig, annoncerer Lifeline Digital: "Kommunikationen med DMP afsluttet".
- Test herefter nødkaldet.

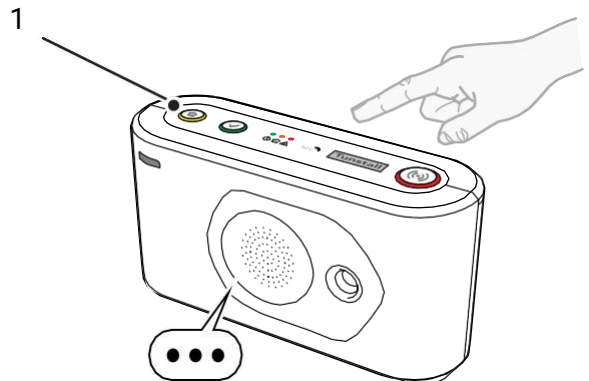

### BEMÆRK

Det kan tage flere minutter afhængigt af netværkshastigheden og størrelsen på de downloadede data.